


**Otic Solution:**

**Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte upute za upotrebu. Sačuvajte upute za upotrebu. Možda ćete ih trebati ponovno pročitati.**

**Namjena:** medicinski proizvod Otic Solution namijenjen je za upotrebu u bolesnika koji imaju problema s vanjskim ušnim kanalom, za sprječavanje bolesti koje zahvaćaju vanjski ušni kanal te za čišćenje stvrdnutih lojnih čepova (ušnog voska) mehaničkim ispiranjem uha, omekšavanjem i rastapanjem ušnog voska uz istovremeno vlaženje i umirivanje ušnog kanala te uklanjanje vode, prljavštine i nečistoća iz ušnog kanala fizikim/kemijskim djelovanjem. Otic Solution ima korisne učinke te obnavlja kožu vanjskog ušnog kanala.

**Sastojci:** glicerín, butilenglikol, kolin-salicilat, alkohol, ulje lavande (*Lavandula angustifolia*), biljni ekstrakt cijelih cvjetnih glavic nevena, cvijeta divizme i gospine trave, timol.

**Sadržaj djelatnih tvari u 1 g proizvoda:** kolin-salicilat 80 %: 174 mg, biljni ekstrakti: 82 mg (pripremljeni od cvijeta nevena: 5,25 mg, gospine trave: 3,53 mg i cvijeta divizme: 3,53 mg), timol: 1 mg. Ovaj medicinski proizvod ne sadrži pripravke ljudske krvi.

**Svojstva:** Otic Solution pripravak je za uho u obliku otopine koja se dozira kao kapi. Radi se o blago žučkastoj uljnoj tekućini koja se nalazi u maloj bočici s kapaljkom.

Proizvod sadrži mješavinu **glicerina i butilenglikola**, koja ima ublažavajući učinak te omekšava i rastapa stvrdnuti ušni vosak. Ona služi i kao podloga u kojoj su otopljeni drugi sastojci. Te tvari zajedno tvore okruženje nepovoljno za razvoj bakterijske infekcije.

Ovaj proizvod sadrži sljedeće djelatne tvari:

**Kolin-salicilat 80 %** upotrebljava se u proizvodu u količini od 17,4 % (m/m). Ima protuupalne učinke koji nadopunjuju učinke proizvoda kada stvrdnuti ušni vosak, onečišćivači ili mehaničko uklanjanje nečistoća uzrokuju nadražnost kože ušnog kanala.

**Biljni ekstrakt** cijelih cvjetnih glavic nevena, cvijeta divizme i gospine trave etanolski je ekstrakt mješavine bilja (cvijet nevena, cvijet divizme i gospina trava). Upotrebljava se u količini od 8,2 % (m/m). Pomaže pri obnavljanju kože i potiče svojstva samočišćenja kože.

**Timol** je tvar koja se upotrebljava u količini od 0,1 % (m/m). Radi se o čistoj tvari, 2-izopropil-5-metilfenol. Timol ima antibakterijske učinke. Povoljno nadopunjuje učinke proizvoda, posebice kada se u ušnom kanalu zadržava voda, što može dovesti do okruženja koje je prikladno za razvoj mikrobovne infekcije.

**Ulje lavande** ima antibakterijske učinke te također daje ugodan miris proizvodu.

**Indikacije:** ovaj proizvod upotrebljava se za uklanjanje nečistoća iz vanjskog ušnog kanala i sprječavanje nastanka ili razvoja bakterijske infekcije i upale ušnog kanala pod uvjetom da je bubnjić neoštećen.

**Kontraindikacije:** preosjetljivost na bilo koji od navedenih sastojaka proizvoda, oštećenje bubnjića u obliku infekcije ili traume (probijeni bubnjić).

**Interakcija:** nema poznatih interakcija proizvoda.

**Nuspojave:** rizik od lokalne reakcije u obliku alergije, nadražnosti ili hiperemije ušnog kanala postoji u rijetkim slučajevima.

**Doziranje i primjena:** prekomjerna količina ušnog voska može se nakupiti kada onečišćivači (voda, prašina) uđu u vanjski ušni kanal ili kada su njegova svojstva samočišćenja narušena. To može dovesti do pogoršanja prohodnosti ušnog kanala i do stvaranja uvjeta za razmnožavanje ili rast mikroorganizama koji mogu uzrokovati infekciju i druge zdravstvene probleme.

Dostupno je i pakiranje koje uz čep s kapaljkom sadrži i mehanički raspršivač. Proizvod se može primjenjivati s pomoću kapaljke ili mehaničkog raspršivača, ovisno o osobnoj preferenciji korisnika. Ako upotrebljavate kapaljku, nanosite 2 – 3 kapi u otvor vanjskog ušnog kanala. Ako upotrebljavate mehanički raspršivač, izvadite ga iz zaštitnog pakiranja i čvrsto ga zategnite na staklenu bočicu umjesto čepa s kapaljkom. Skinutu kapaljku nemojte više upotrebljavati. Pritisnite nekoliko puta za dovođenje tekućine. Umetnite kraj mehaničkog raspršivača u otvor vanjskog ušnog kanala i pritisnite 2 – 3 puta. Proizvod se obično primjenjuje 2 – 4 puta dnevno u svako uho. Prije upotrebe zagrijte otopinu do tjelesne temperature (36 – 37 °C) tako da je, primjerice, grijete među dlanovima. Najranije 10 minuta nakon upotrebe proizvoda nastavite s čišćenjem uha. Za mehaničko čišćenje uha pažljivo upotrijebite štapić za uši jer pristup lojnom čepu može biti otežan te postoji rizik da ga pogurate dublje u ušni kanal. Kontinuiranu upotrebu potrebno je ograničiti na pet dana.

**Opres:**

- ⚠ Nemojte upotrebljavati proizvod ako postoji oštećenje bubnjića.
- ⚠ Ako se slučajno proguta, popijte veliku količinu vode i obratite se svojem liječniku.
- ⚠ U slučaju izravnog doticaja s očima isperite oči pod tekućom vodom.

**Čuvanje:**

čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u originalnom pakiranju. 5 °C  25 °C  Čvrsto zatvoriti nakon upotrebe i čuvati u uspravnom položaju.

**Upozorenje:**

- ⚠ Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod ako ste alergični ili preosjetljivi na bilo koji od njegovih sastojaka.
- ⚠ Obratite se svojem liječniku ako primijetite bilo kakve neželjene nuspojave.
- ⚠ Ako odaberete mehanički raspršivač za primjenu, odložite skinutu kapaljku u otpad.
- ⚠ Proizvod se u trudnica ili dojilja i djece mlađe od tri godine smije upotrebljavati samo nakon savjetovanja sa stručnim liječnikom.
- ⚠ Djeca mlađa od 15 godina smiju upotrebljavati proizvod isključivo pod nadzorom odrasle osobe.

**Pakiranje:** pakiranje proizvoda Otic Solution sadrži 10 ml otopine koja se nalazi u maloj, smeđoj, staklenoj bočici s čepom s kapaljkom. **Dostupno je i pakiranje koje uz čep s kapaljkom sadrži i mehanički raspršivač. Na tržištu se ne mogu nalaziti obje inačice.**








**Zbrinjavanje:** vratite sav neiskorišteni proizvod u ljekarnu. Odložite čisto pakiranje u odgovarajući spremnik za recikliranje otpada.

 ENEO Pharmaceuticals s. r. o.,  
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Republika Češka,  
adresa e-pošte: info@eneo.cz

 Informacije potražite na pakiranju.

Verzija C-400-003-09-HR-R1, 11.12.2024



5 °C  25 °C	Ograničenje temperature.	 Broj serije.
	Čuvati podalje od sunčeve svjetlosti.	 Rok upotrebe.
	Lomljivo; potreban je oprez pri rukovanju.	 Proizvođač.
	Kataloški broj.	 Upozorenje.